

8 PASOS
PARA UNA FÁCIL
Y EFECTIVA REALIZACIÓN
DE LA PRUEBA DE GLUCOSA
EN SANGRE CON EL
Nuevo Glucómetro

GlucoQuick®
G30a



Reg. Sanitario 2011DM007698



DIABETRICS
361° EN FUNCIÓN DE LA VIDA

Powered by



1


Antes de realizar la prueba lave y seque muy bien sus manos



- Recuerde que para garantizar resultados precisos y efectivos sus manos deben estar completamente limpias y secas.

2

Aliste el punccionador



- Con las manos limpias y secas prepare el punccionador para realizar la extracción de la muestra de sangre.

3

Aliste la tira que va a usar



- Verifique la fecha de vencimiento. Si las tiras están vencidas **NO LAS USE**, los resultados de la glucometría darán errados.
- Si es la primera vez que destapa el frasco, anote en la etiqueta la fecha. **DESPUÉS DE ESTA FECHA TENDRÁ TRES MESES PARA USAR LAS TIRAS.**
- Retire o tome del frasco la tira que va a usar. Evite tocar las demás tiras para no contaminarlas.
- Después de retirar la tira que va a usar, **TAPE O CIERRE BIEN EL FRASCO.** Si el frasco queda mal cerrado o si permanece abierto por más de 1 minuto se puede originar contaminación de las tiras alterando los resultados.

4


Inserte la tira en la ranura del Glucómetro



- Al insertar la tira en el glucómetro éste se encenderá automáticamente, apareciendo en la pantalla: "CHK"   intermitente con fecha y hora. Indicando que está listo para colocar la gota de sangre.

5

Extracción de la muestra de sangre



- Elija el lugar de donde va a extraer la muestra de sangre.
- Sostenga el dispositivo de punción firmemente contra el lugar que eligió para extraer la muestra de sangre.
- Presione el botón naranja del dispositivo de punción. Sentirá un leve pinchazo.
- Oprima suavemente alrededor del área perforada para obtener la muestra de sangre.

6

Lleve la muestra de sangre al Glucómetro



- Acerque la muestra de sangre directamente del lugar de extracción a la punta de la tira reactiva que inserto en el glucómetro.
- La tira absorberá automáticamente la muestra de sangre, iniciando la lectura de la prueba de glucosa en sangre. En 5 segundos obtendrá el resultado.



7



Lectura de resultados

- El glucómetro GlucoQuick G30a hará un conteo regresivo hasta 0, después de esto aparecerá en la pantalla el resultado de la prueba y será automáticamente almacenado en la memoria con fecha y hora.

La pantalla mostrará los resultados de su glucosa en sangre de la siguiente forma:

Aparece	Cuando la glucosa está en:
L ₀	< 20 mg/dL (1.1 mmol/L)
H ₁	< 600 mg/dL (33.3 mmol/L)
KETONE?	< 240 mg/dL (13.3 mmol/L)

Hora del día	Rango normal de glucosa en plasma para personas sin diabetes (mg/dL)
Ayuno y antes de comida	< 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
2 horas después de comidas	< 140 mg/dL (7.8 mmol/L)

Fuente: American Diabetes Association (2010), Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care, 33 (Supplement 1): S1-S100.

Medline Plus: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm>
 Consulte con su médico para determinar el rango objetivo que mejor funcione para usted.

8

Expulsión de la tira usada

- Con el botón lateral (eyector de tiras) expulse con facilidad la tira usada.



Contáctenos:

www.diabetrics.co
www.circulodelavida.co
 Llama al 01 8000 522277

DIABETRICS
 361° EN FUNCIÓN DE LA VIDA

Powered by 